

DISPOSITIVOS MEDIFAR

Pinza de Incontinencia Urinaria Clip

4 niveles de presión · 3 almohadillas incluidas



¿Qué es?

La Pinza de Incontinencia Urinaria es un dispositivo médico de uso externo diseñado para controlar el goteo involuntario de orina en hombres durante las actividades del día a día. Funciona ejerciendo una presión suave y controlada sobre la uretra para detener las pérdidas sin necesidad de pañal, de forma completamente discreta bajo la ropa.

¿Para quién está indicada?

- Hombres post-cirugía de próstata
- Hiperplasia prostática benigna
- Incontinencia por urgencia
- Pérdida progresiva del control urinario
- Antecedentes de lesiones del esfínter

Cómo elegir la almohadilla correcta

⚠ Las almohadillas NO se eligen por el tamaño del pene, sino según el nivel de goteo del paciente.

Almohadilla	Nivel de presión	Indicada para
S – Chica	Menor presión	Goteo leve
M – Mediana	Presión media	Goteo moderado – EMPEZAR AQUÍ si no sabe cuál usar
L – Grande	Mayor presión	Goteo severo o cuando M no controla completamente

● Protocolo de ajuste

Iniciar siempre con almohadilla **M** y cierre en **nivel 1**. Si sigue goteando, subir un nivel. Si persiste, cambiar a **L**. Si hay demasiada presión, bajar a **S**.

AJUSTE UNIVERSAL

4 niveles de presión + 3 tallas



1 PINZA · 3 TALLAS
almohadillas intercambiables



Instrucciones de uso


SOLO 3 PASOS FÁCILES

AJUSTE RÁPIDO · USO SEGURO · COMODIDAD TODO EL DÍA

1

INICIO


La pinza viene cerrada y lista para usar.



2

COLOCACIÓN


Abra la pinza y colóquela de forma cómoda en la posición correcta.




3


AJUSTE

Cierre la pinza suavemente hasta sentir un ajuste seguro y cómodo.







SEGURO
Ajuste controlado para mayor comodidad.



CÓMODO
Almohadillas suaves que cuidan tu piel.



AJUSTABLE
4 niveles de presión para una adaptación personalizada.



REUTILIZABLE
Diseñado para un uso diario y prolongado.

medifar

Reglas de uso

1 Retírela cada 1 a 2 horas para orinar.

2 Cambie la posición cada 2 horas un poco más arriba o abajo para evitar irritación.

3 No usarla durante la noche durante el sueño use una compresa de incontinencia.

4 Hable con su médico o urólogo el uso excesivo podría provocar problemas de circulación o irritación.

Especificaciones técnicas

Material	Plástico ABS + almohadillas de silicona médica
Dimensiones	7,6 cm largo × 3,8 cm ancho × 1,3 cm grosor
Niveles de presión	4 niveles ajustables en el cierre
Almohadillas	3 tamaños intercambiables (S, M, L) – incluidas
Metal	No contiene – no activa detectores de aeropuertos
Resistencia al agua	Apto para piscina o tina (lavar bien después)
Duración estimada	3 a 5 meses con uso regular

¿Necesita orientación antes de comprar?

Le orientamos para que elija y use la pinza correctamente.

WhatsApp: +56 9 7782 7318

Wilmer Padrón · [medifar.cl](https://www.medifar.cl) · [@medifaroficial](https://www.instagram.com/medifaroficial)

Este dispositivo no reemplaza la consulta médica. Consulte con su médico o urólogo si tiene dudas sobre su uso. La información de esta ficha tiene fines orientativos y comerciales.